

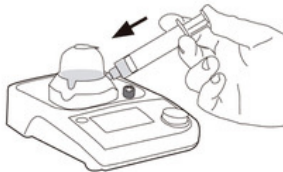


1

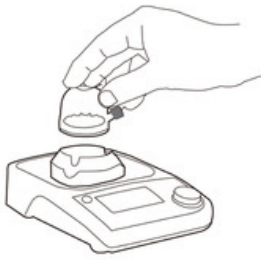


Retirar la cápsula VARIXIO® Pod Air de la bolsa y colocarla en el alojamiento del dispositivo agitador VARIXIO® Pro Mag en la posición diestra o zurda, según convenga.
Presionar botón .

2




Cargar 2 ml de líquido esclerosante (POL o STS) en una jeringa de 5 o 10 ml. Retirar el tapón Luer de la cápsula, acoplar firmemente la jeringa a la cápsula y cargar la cápsula con los 2 ml de líquido esclerosante.

3

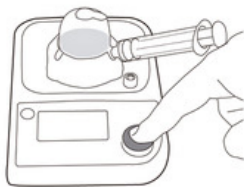

Programar con el botón START/STOP. Girar para seleccionar. Presionar para confirmar la selección.

1. El tipo de cápsula (siempre AIR para el uso con VARIXIO® Pod Air).
2. El tipo de esclerosante (POL o STS).
3. La concentración ($<1\%$ ó $\geq 1\%$ para POL, o $< 0,5$ ó $\geq 0,5$ para STS).

Para volver a la pantalla anterior: presionar el botón .


Sin retirar la jeringa del puerto Luer presionar nuevamente el botón para iniciar la agitación. Esperar mientras se genera la espuma.

4




De forma automática, una vez completado el paso de formación de la espuma (menos de 45 segundos) el agitador reduce la velocidad (sin detenerse del todo) y mediante un icono en la pantalla digital, representado una jeringa, indica que puede procederse a la retirada de la espuma.

5

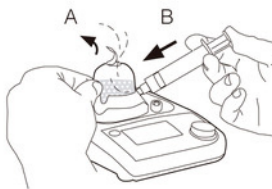


Antes del aspirado de la espuma abrir el opérculo superior (A) y accionar la jeringa (B) para la total eliminación del aire que pudiera contener.

6

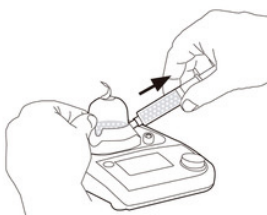

Manteniendo la cápsula en el agitador, y mientras continúa la agitación a baja velocidad, proceder al aspirado controlado de la espuma, a una velocidad no superior a 1 ml por segundo, hasta un máximo de 9 ml de espuma total aspirada.

7

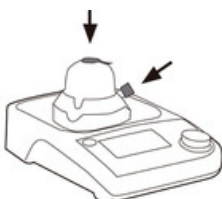

Cerrar el tapón Luer. VARIXIO® Pro Mag mantendrá la espuma restante en agitación a baja velocidad por si precisa una nueva aspiración en un tiempo no superior a 15 minutos.

8



Detener la agitación pulsando el botón START/STOP y desechar la capsula. Presionar botón  para programar un nuevo uso.